

Informace pro

Určeno pro: Lékaře a zdravotní sestry

Zavedení metody Reptilázový test (RT)

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom vás informovali o

zavedení metody Reptilázový test (RT) od 3.11.2025.

Reptilázový test (batroxobinový čas) vychází z principu trombinového testu (TT). RT je možné použít při prodloužení výsledku TT k odlišení prodloužení TT vlivem heparinu od poruch fibrinogenu. Normální výsledek reptilázového testu ze vzorku s patologickým trombinovým testem svědčí o přítomnosti heparinu ve vzorku (terapie heparinem, kontaminace heparinem při odběru krve, intoxikace heparinem).

Odběrový materiál:

Vyšetření se provádí z nesrážlivé krve odebrané do zkumavky s obsahem 3,2% citrátu sodného v poměru s krví 1:9. Provádí-li se pouze odběr na hemokoagulační vyšetření první cca 2 - 3 ml krve se nepoužívají. Při odběru se naplní odběrová zkumavka krví **přesně** po nominální hodnotu tzv. rysku a krev se s antikoagulantem důkladně promíchá. Zkumavka se převrátí 5 - 7krát dnem vzhůru. Netřepat! Spolu s žádankou se transportuje do laboratoře při teplotě 15 - 25 °C nejpozději do 2 hodin od odběru. Metoda je dostupná v režimu rutina i statim.

S pozdravem.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Kolektiv pracovníků ÚLM FNO.

Fakultní nemocnice Ostrava

Ústav laboratorní medicíny, OKH

17. listopadu 1790/5 / 708 52 Ostrava-Poruba
Telefon: +420 597 371 111 / Fax: +420 596 917 340
E-mail: posta@fno.cz / www.fno.cz

Zdravotnická laboratoř č M8026 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO 15189

